


HIDROGEL PARA A DESBRIDAÇÃO DAS FERIDAS COM NECROSE SECA

UrgoHidrogel



Urgo Hidrogel®

TAMANHOS	U/C	CÓDIGO
Bisnaga de 15 g	10	501544

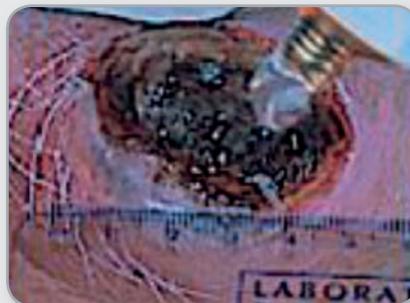

HIDROGEL PARA A DESBRIDAÇÃO DAS FERIDAS COM NECROSE SECA

UrgoHidrogel

COMPOSIÇÃO

Gel estéril amorfo, transparente e viscoso, constituído por um polímero de origem natural, polisacárido, disperso numa fase aquosa.

- Goma Guar (galactomanano altamente hidrófilo).
- Propilenoglicol.
- Água purificada (80%).

APRESENTAÇÃO:

Bisnagas monodose estéreis com 15 g de gel.

MODO DE ESTERILIZAÇÃO:

Autoclave.

PROPRIEDADES

- **Urgo Hidrogel®** é um gel para a hidratação das feridas com necrose seca que requerem um amolecimento contínuo para acelerar os processos naturais de detensão autolítica.
- Em contacto com a placa necrótica, **Urgo Hidrogel®** comporta-se como um doador de água desde a matriz polissacárida até ao tecido necrosado.
- A utilização de **Urgo Hidrogel®** com apósitos oclusivos (**Algoplaque® Film**) evita que o gel seque e reforce as suas propriedades hidratantes.
- Devido à sua elevada viscosidade (> 100 000 centipoises), **Urgo Hidrogel®** permanece coeso durante a aplicação e não cola, inclusive sobre as feridas em declive.

INDICAÇÕES

- Placas de necrose seca.
- Desbridação fibrino-necrótico.
- Feridas átonas secas em espera de granulação.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- O aparecimento ou suspeita de uma sobreinfecção sobre a placa necrótica contra-indica a continuação do tratamento com apósitos oclusivos.
- A eliminação progressiva das placas necróticas é acompanhada por um aumento da profundidade da ferida. Este fenómeno é normal até ao total desaparecimento da necrose.
- **Período de conservação:** 3 anos.

MODO DE EMPREGO:

- Limpar a ferida com soro fisiológico.
- Aplicar **Urgo Hidrogel®** sobre toda a superfície da ferida numa fina camada de 4-5 mm de espessura evitando que o gel entre em contacto com a pele sã.
- Cobrir com um apósito secundário (**Algoplaque® Film**) deixando no mínimo 3-4 cm de cada lado.
- Renovar a aplicação de três em três dias como média quando tiver amolecido a placa necrótica.

ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário com marcado CE 0459.
- Produto sanitário de classe IIb.