




# UrgoTul Ag

## PENSO EM MALHA FLEXÍVEL IMPREGNADA COM SULFATO DE PRATA E TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE

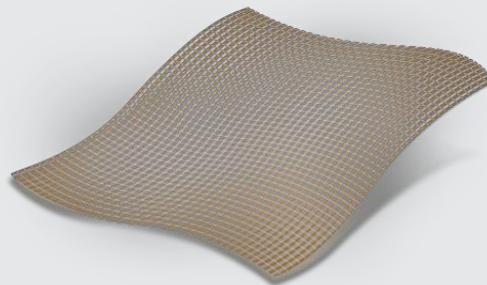

CE 0086 STERILE IN

Para o tratamento de feridas com pouco exsudado em risco de infecção local

- Amplo espectro antimicrobiano
- Libertação contínua de iões prata durante 7 dias
- Cicatrização em ambiente húmido.
- Remoção não traumática e indolor

 **UrgoTul Ag**

Apresentação em blister estéril individual fornecidos em caixas.

Tamanho	U/C	Referência URGO
10x12 cm	16	507633
15x15 cm	10	509362
15x20 cm	10	509363



# UrgoTul Ag



## DESCRIÇÃO

**Urgotul® Prata** é um apósito impregnado com sais de prata e a Tecnologia Lípido-Colóide (TLC), inovação exclusiva patenteada pelos Laboratórios URGO. **Urgotul® Prata** é um apósito hidrocolóide não adesivo, não oclusivo, não aderente à ferida, composto por uma rede de poliéster impregnada de partículas hidrocolóides (Carboximetilcelulose), vaselina e sais de prata.

### APRESENTAÇÃO:

Acondicionamento em **blister** individual estéril, pronto a usar.

### MODO DE ESTERILIZAÇÃO:

Rádio esterilização.

## PROPRIEDADES

A Tecnologia lípido-colóide é uma inovação dos Laboratórios URGO.

A sua especialidade consiste na presença de uma matriz polimérica que garante a coesão das partículas hidrocolóides e da vaselina numa rede de poliéster. Ao entrar em contato com o exsudado, as partículas hidrocolóides (CMC) gelificam e formam uma camada lípido-colóide.

### Isto dá origem a propriedades específicas:

- Manutenção do meio húmido favorável à cicatrização.
- Gelificação em contato com a ferida.
- Extração não traumática dos tecidos neoformados.
- Substituição indolor do apósito para o paciente.
- Respeito pela pele perilesional.

Além disso, os iões de prata contidos na interfase lípido-colóide criada, conferem a **Urgotul® Prata** uma atividade antibacteriana de contato, capaz de reduzir a carga bacteriana local, evitando assim a superinfecção de feridas em risco.

A prata possui uma vasta ação antimicrobiana, incluindo as bactérias Gram negativas e Gram positivas, assim como certos bolores e leveduras. É particularmente eficaz contra os *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* Méti-R e *Streptococcus pyogenes*, assim como contra o *Pseudomonas aeruginosa* (bacilo piocianico), que são, na maioria dos casos, os germes responsáveis pelas grandes infecções das feridas. O apósito demonstrou uma atividade antibacteriana "in vitro" contínua durante 7 dias. A atividade antibacteriana do apósito permite reduzir o odor produzido pelos microrganismos presentes nas feridas.

## INDICAÇÕES

- **Urgotul® Prata** é prescrito para o tratamento de todas as feridas exsudativas em risco de infecção: feridas crónicas (úlceras, úlceras de pressão, escaras), e feridas agudas (queimaduras de segundo grau, dermoabrasões, feridas traumáticas, feridas pós-operatórias, etc.).
- Devido à ausência de adesivo, **Urgotul® Prata** está particularmente recomendado para o tratamento de feridas com pele perilesional debilitada.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

- Sensibilidade conhecida à prata ou a outros componentes do apósito.
- Não deixe o apósito colocado no paciente durante um exame de Ressonância Magnética Nuclear (IRM).

## CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

### MODO DE EMPREGO:

#### 1. Preparação da ferida:

- Limpe a ferida com soro fisiológico. No caso de usar antisséptico previamente, lave cuidadosamente a ferida com soro fisiológico.

#### 2. Aplicação do apósito:

- Retire as bandas protetoras do apósito.
- Aplique **Urgotul® Prata** diretamente sobre a ferida.
- Cobrir **Urgotul® Prata** com um apósito secundário: compressas estéreis seguras por intermédio de uma banda de fixação de tipo **Nylex® fix**.

#### 3. Renovação do apósito:

O apósito **Urgotul® Prata** deve ser substituído entre 1 a 3 dias, dependendo da ferida tratada e da sua evolução.

### PRECAUÇÕES DE EMPREGO:

- O tratamento com **Urgotul® Prata** deve ser exclusivamente acompanhado sob supervisão médica.
- O uso combinado com outros tratamentos locais não é aconselhável.
- Guarde **Urgotul® Prata** sem dobrar, ao abrigo do calor e da luz, a uma temperatura inferior a 25°C.
- O uso do apósito **Urgotul® Prata** não foi testado durante a gravidez, a lactância, num recém-nascido e em bebés prematuros.
- Não conserve o apósito mais de 24 horas após a sua abertura.
- Evite o contato com os eléctrodos ou géis condutores usados durante um ECG e EEG.
- Período de conservação: 3 anos.

## ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe III.
- Marcado CE.