



INTERFASE LÍPIDO-COLÓIDE FLEXÍVEL

UrgoTul



Indicações:

Úlceras varicosas e por decúbito pouco ou moderadamente exsudadas.

- Flexível.
- Feridas agudas e crónicas.
- Cicatrização em meio húmido.
- Remoção sem dor e não traumática.
- Proliferação de fibroblastos.

Urgotul®

Acondicionado em caixas com apósitos esterilizados individuais em blister.

TAMANHOS	U/C	REF
10 x 12 cm	10	550011
15 x 15 cm	10	550014
10 x 40 cm	10	550012





INTERFASE LÍPIDO-COLÓIDE FLEXÍVEL

UrgoTul

DESCRIPÇÃO

- Interfase lípido-colóide, esterilizada, não adesiva e não oclusiva, procedente da tecnologia lípido-colóide, uma inovação exclusiva patenteada pelos Laboratórios Urgo.

COMPOSIÇÃO:

Urgotul® é um apósito lípido-colóide flexível, fabricado com um tecido de poliéster impregnado com partículas hidrocolóides (carboximetilcelulose) e vaselina.

MODO DE ESTERILIZAÇÃO:

Esterilizado por radiação ionizante.

PROPRIEDADES

- Em contacto com o exsudado da ferida, as partículas hidrocolóides de **Urgotul®** reagem com a vaselina para formar uma interfase lípido-colóide, criando um meio húmido favorável ao processo de cicatrização.
- Gordo na composição sem o ser ao tacto, **Urgotul®** não adere à ferida nem à pele circundante. A eliminação do apósito não é dolorosa nem traumática para ferida.
- **Urgotul®** favorece uma cicatrização rápida ao estimular a proliferação dos fibroblastos.
- Flexível e adaptável, **Urgotul®** é adequado para feridas de difícil localização.

INDICAÇÕES

- **Urgotul®** está indicado no controlo tanto de feridas agudas (queimaduras, abrasões ou raspaduras, feridas pós-operatórias), como de feridas crónicas (úlceras da perna, úlceras de pé diabético) na etapa de granulação e epiteliação.
- **Urgotul®** está também indicado no controlo da epidermólise bolhosa.
- Ao ser flexível, **Urgotul®** está particularmente indicado na cobertura de lesões irregulares ou de difícil localização, e no preenchimento de feridas cavitárias.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

MODO DE EMPREGO:

1. Preparação da ferida:

- Limpar a ferida com soro fisiológico.
- No caso de utilizar um anti-séptico, enxaguar previa e cuidadosamente a ferida com soro fisiológico antes de aplicar **Urgotul®**.

2. Aplicação do apósito:

- Retirar a película protectora transparente.
- Aplicar **Urgotul®** na ferida numa só camada.
- Com o objectivo de adaptar o tamanho do apósito à lesão, **Urgotul®** pode recortar-se utilizando material estéril.
- Cobrir **Urgotul®** com um apósito secundário adequado para absorver o exsudado da ferida.
- Manter o apósito secundário com uma ligadura extensível, um adesivo ou uma compressa tubular elástica.

3. Renovação do apósito:

- **Urgotul®** pode ser substituído entre 2 a 4 dias e manter-se colocado durante 7 dias em função da ferida.
- Em pacientes com epidermólise bolhosa, o apósito deve ser substituído após 1 a 3 dias.

PRECAUÇÕES DE EMPREGO:

- **Urgotul®** pode aderir às luvas de látex. Nesse caso, humedecer as luvas com soro fisiológico, o que facilita a manipulação do apósito.
- Se aparecerem sinais de infecção local, pode continuar-se o tratamento sob supervisão médica, embora neste caso seja preferível usar **Urgotul® S.Ag** ou **Urgotul® Ag**.
- Em caso de feridas profundas, não é necessário aplicar **Urgotul®** em várias camadas.
- Em caso de lesões profundas, irregulares ou fistulosas, deixar uma parte do **Urgotul®** visível e acessível ao exterior da lesão.
- Não voltar a esterilizar.
- Armazenar **Urgotul®** em posição horizontal, e ao abrigo da humidade e do calor (temperatura inferior a 25° C).

ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe IIb.
- Marcado CE.